


Primeros pasos con el sistema µCor™

1 Reúna los componentes

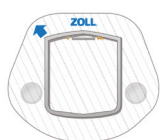


Sensor



Parche



Gateway

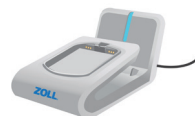


Cargador




Cable de alimentación

2 Cargue el Sensor y el Gateway

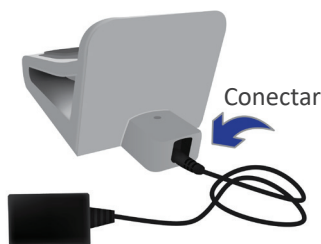

Conectar

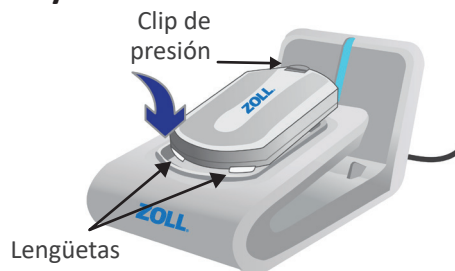

Clip de presión

Lengüetas



1. Conecte el Cable de alimentación al Cargador.


2. Conecte el Cable de alimentación a la toma de corriente.

3. Coloque el Sensor en el Cargador; las lengüetas inferiores deben ir primero.


4. Coloque el Gateway en el Cargador.

El sistema está listo para ser utilizado cuando los dos símbolos de la batería aparecen como totalmente Cargados  en la pantalla del Gateway.

3 Prepare su piel

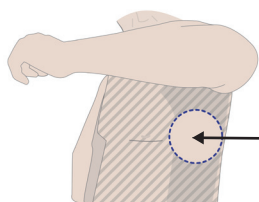

Lado izquierdo del cuerpo
Zona objetivo

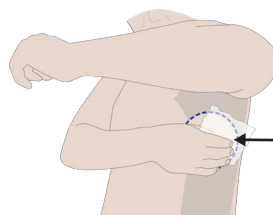


Frote con dos Toallitas de Preparación

1. Recorte el pelo (si procede) del lado izquierdo en la zona objetivo.

2. Frote la zona objetivo con una de las Toallitas de Preparación suministradas. Repita con una segunda Toallita de Preparación.
3. Deje que la piel se seque.


4 Prepare el Parche

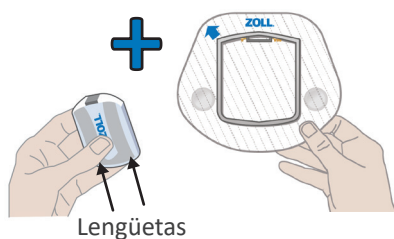

Lengüetas



Encaje

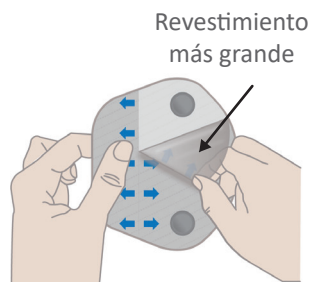

Revestimiento más grande




Revestimiento más pequeño



1. Instale las lengüetas inferiores del Sensor en el Parche y, a continuación, sujete la parte superior del Sensor en su sitio.

2. Despegue primero la pieza de revestimiento más grande y luego la más pequeña. Procure no tocar el adhesivo expuesto.

5 Coloque el Parche en el cuerpo

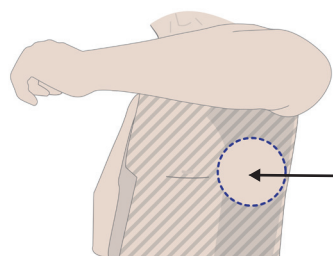

Lado izquierdo del cuerpo
Zona objetivo

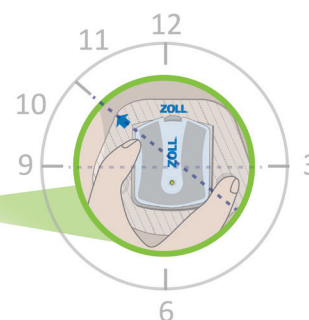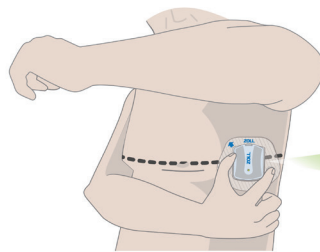

1. Póngase delante de un espejo.
2. Levante el brazo izquierdo hasta la altura del hombro.

3. Coloque el Parche a unos 2-3 dedos de ancho por debajo de la axila, de manera que la ZOLL quede horizontal en la parte superior del Parche.
4. La flecha  debe apuntar a una posición entre las 10 y 11 horas.

5. Asegúrese de que el Parche esté colocado de forma lisa y plana sobre su piel.

6. Una luz verde  aparece en el Sensor en 30 - 60 segundos.

Si ve una luz verde , habrá configurado correctamente su sistema.
El Sensor está ahora transmitiendo sus datos a ZOLL.


Si NO hay luz verde, llame a ZOLL al 1.888.592.3798

Responsabilidades del paciente


Todos los días

- Lleve el Parche con el Sensor en todo momento, incluso en la ducha y al dormir.
- Lleve el Gateway, manteniéndolo a menos de 30 pies del Sensor.
- Cargue el Gateway durante la noche mientras duerme (al menos 3 horas) - Vea ② *Cargar el Sensor y el Gateway* en la página 1.


Reemplace el Parche Cada 7 Días

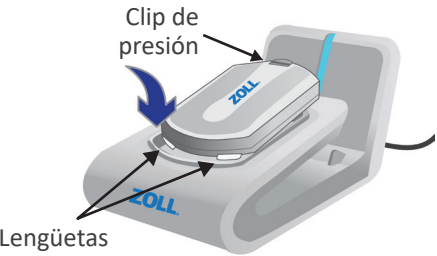


1. Presione el clip de presión del Sensor y retire el Sensor del Parche.
2. Coloque el Sensor en el Cargador.

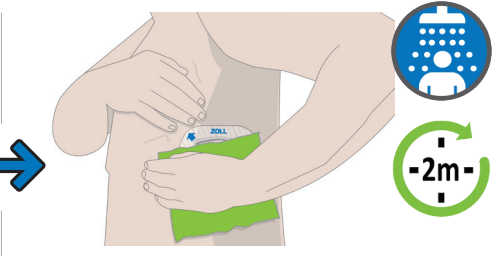

3. Mantenga un paño húmedo y caliente contra el Parche para mojarlo durante aproximadamente 2 minutos. Esto puede hacerse en la ducha.

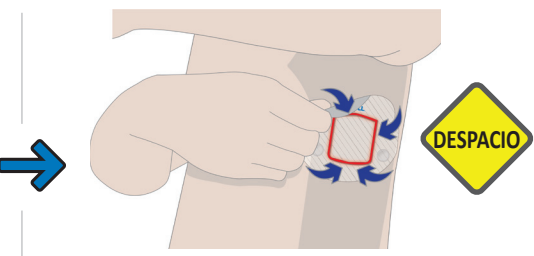


4. Despegue **lentamente** cada esquina del Parche hacia el centro hasta que solo quede adherida al cuerpo la zona que se encuentra debajo del marco (zona señalada en rojo).

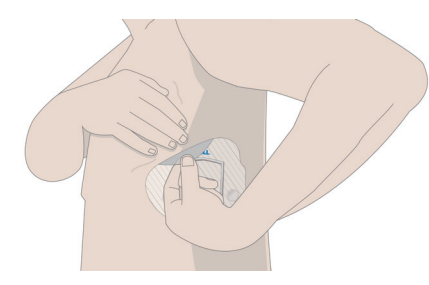


5. Pele **lentamente** el Parche restante mientras se sujeta la piel contra el cuerpo con la mayor fuerza posible.

6. Deseche el Parche. No lo reutilice.
7. Una vez que el Sensor esté completamente cargado, repita los pasos ③ a ⑤ a partir de la página 1 utilizando un *nuevo* Parche. Asegúrese de aplicar el *nuevo* Parche lo más cerca posible de la ubicación del Parche anterior.


Registre un síntoma y una actividad

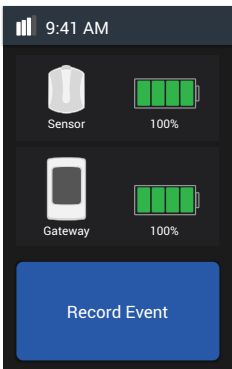

1. Seleccione Record Event.

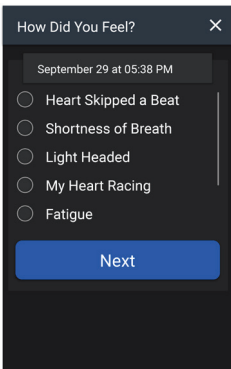

2. Seleccione un síntoma que describe cómo se siente.
3. Seleccione Next.

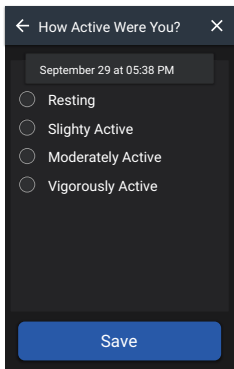

4. Seleccione su nivel de actividad.
5. Seleccione Save.



Puede consultar la declaración de las indicaciones de uso y una lista completa de precauciones, consulte el manual de instrucciones del paciente.



ADVERTENCIAS

- No utilice el sistema μ Cor™ si tiene alergias o sensibilidad cutánea al hidrogel del electrodo o a los adhesivos de base acrílica. Se puede producir una irritación como el enrojecimiento o el picor.
- No utilice el sistema μ Cor si tiene escarificación cutánea en áreas donde se requiere la colocación del dispositivo (Parche + Sensor).
- No use el sistema μ Cor si tiene una hinchazón significativa en el lado izquierdo de su pecho donde se aplica el dispositivo. Una hinchazón significativa puede afectar negativamente al funcionamiento del dispositivo.

Si tiene alguna pregunta, contacte con ZOLL
24 horas al día, 7 días a la semana: Llamada gratuita (EE. UU.) +1.888.592.3798



121 Gamma Drive • Pittsburgh, PA 15238 USA

Solo con receta médica

Distribuido por ZOLL Laboratory Services

Patente: www.zoll.com/patents

© 2024 ZOLL Laboratory Services, LLC. Todos los derechos reservados.

ZOLL es una marca comercial y/o marca registrada de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

20B0080 SUS Rev G